

# **THERAPIESCHUHE**

# Das überlegene Therapiekonzept zur frühfunktionellen Therapie

Frühfunktionelle Behandlungsmaßnahmen, insbesondere bei Verletzungen am Fuß und Unterschenkel, haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Sie tragen erfolgreich zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Verkürzung der Rehabilitationszeit bei.

Durch die alternative frühfunktionelle Behandlung mit unseren Therapieschuhen sind limitierte, sicher geführte und stabilisierte Bewegungen und Belastungen möglich.

## **VORTEILE**

Vorteile der frühfunktionellen Behandlung mit den ORTHOTECH Therapieschuhen:

# SCHNELLERE HEILUNG

- \* Frühere Belastung möglich
- \* Verkürzte Arbeitsunfähigkeit

#### MEHR KOMFORT

- \* Keine Krücken oder voluminösen Verbände
- \* Für Körperhygiene zugänglich
- \* Abrollunterstützung durch Fersen-Absatzrolle
- \* Fersenpolster
- \* In zwei Weiten lieferbar, H und L

## Überlegene Therapie gegenüber:

#### **GIPS**

- \* Reduzierte Thrombosebehandlung
- \* Wundbehandlung möglich
- \* Keine Mehrfachbehandlung nötig

#### ORTHESEN UND BANDAGEN

\* Bessere Rotationsstabilität

## HARTPLASTIKVERBÄNDEN

- \* Erhalt der Gangsymmetrie und Körperstatik
- \* Mehr Mobilität

#### ORTHOTECH STABIL

#### **INDIKATION**

- \* Behandlung und Nachbehandlung operativ und konservativ zu versorgender Kapsel-Bandläsionen des Sprunggelenks
- \* Bestimmte knöcherne Verletzungen des Sprunggelenks und des Fußes wie z.B. Stressfrakturen
- \* Sprunggelenkdistorsionen
- \* Sprunggelenksarthrose
- \* Wackelsteifheit
- \* Ruhigstellung im Bereich von Fußwurzel und Mittelfuß
- \* Gelenkschonung im Vorfußbereich

Unsere bewährter ORTHOTECH Stabil ist nun bei gleicher Indikation und mit den gewohnten Vorteilen auch mit HECKEINSTIEG erhältlich.

#### **REZEPTIERUNG**

1 Paar ORTHOTECH Stabil-Therapieschuhe, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.0001

#### Klett oder Schnürung / Weiß / Weite H





Sandale / Weiß oder Schwarz

Klett oder Schnürung (auch in Leder) Schwarz / Weite H und L

Heckeinstiea







## ORTHOTECH VARIO-STABIL

#### **INDIKATION**


- \* Frühfunktionelle Therapie der Achillessehnenruptur nach operativer und konservativer Behandlung
- \* Stabilitätshilfe bei Belastungsinsuffizienzen und Bewegungsschmerzen im Bereich von Unterschenkel und Rückfuß im Sinne eines flexiblen Arthrodesenstiefels
- \* Nachversorgung von Frakturen und Arthrodesen im Bereich zwischen Fußwurzel und distalem Unterschenkel
- \* Ausgleich muskulärer Funktionsschwächen (Lähmungen) im Bereich von Unterschenkel und Fuß

#### REZEPTIERUNG

1 Paar ORTHOTECH Vario-Stabil-Therapieschuhe, bei Achillessehnenruptur Absatzerhöhung beidseits beachten! Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.1000

Vario-Stabil / Weiß-Grau Vario-Stabil / Schwarz Weite H



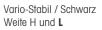



# ORTHOTECH REHA-STABIL

#### **INDIKATION**

- \* Zustand nach Schlaganfall
- \* Schlaffe Lähmung
- \* Spastische Lähmung

#### **REZEPTIERUNG**

1 Paar Orthotech Reha-Stabil-Schuhe, Kassenleistung Hilfsmittel-Katalog Nr. 31.03.03.2009

Reha-Stabil / Weiß-Grau Reha-Stabil / Schwarz Weite L







# **ORTHOTECH STABIL-SAFETY**

Der Arbeitssicherheits-Stabilschuh/S3 (gemäß EN ISO 20345:2007)

#### **INDIKATION**

- \* Behandlung und Nachbehandlung von Sprunggelenksverletzungen
- \* Zur Vorbeugung bei Patienten, die gehäuft Sprunggelenksverletzungen aufweisen
- \* Sprunggelenksarthrose
- \* Wackelsteifheit

Orthopädische Zurichtung und individuelle Einlagenversorgung nach BGR 191 möglich

Stabil-Safety / S3 Schwarz Safety-Control / S3 Schwarz



